


BC-5380

**ANALISADOR AUTOMÁTICO
HEMATOLÓGICO MINDRAY**

Manual do operador

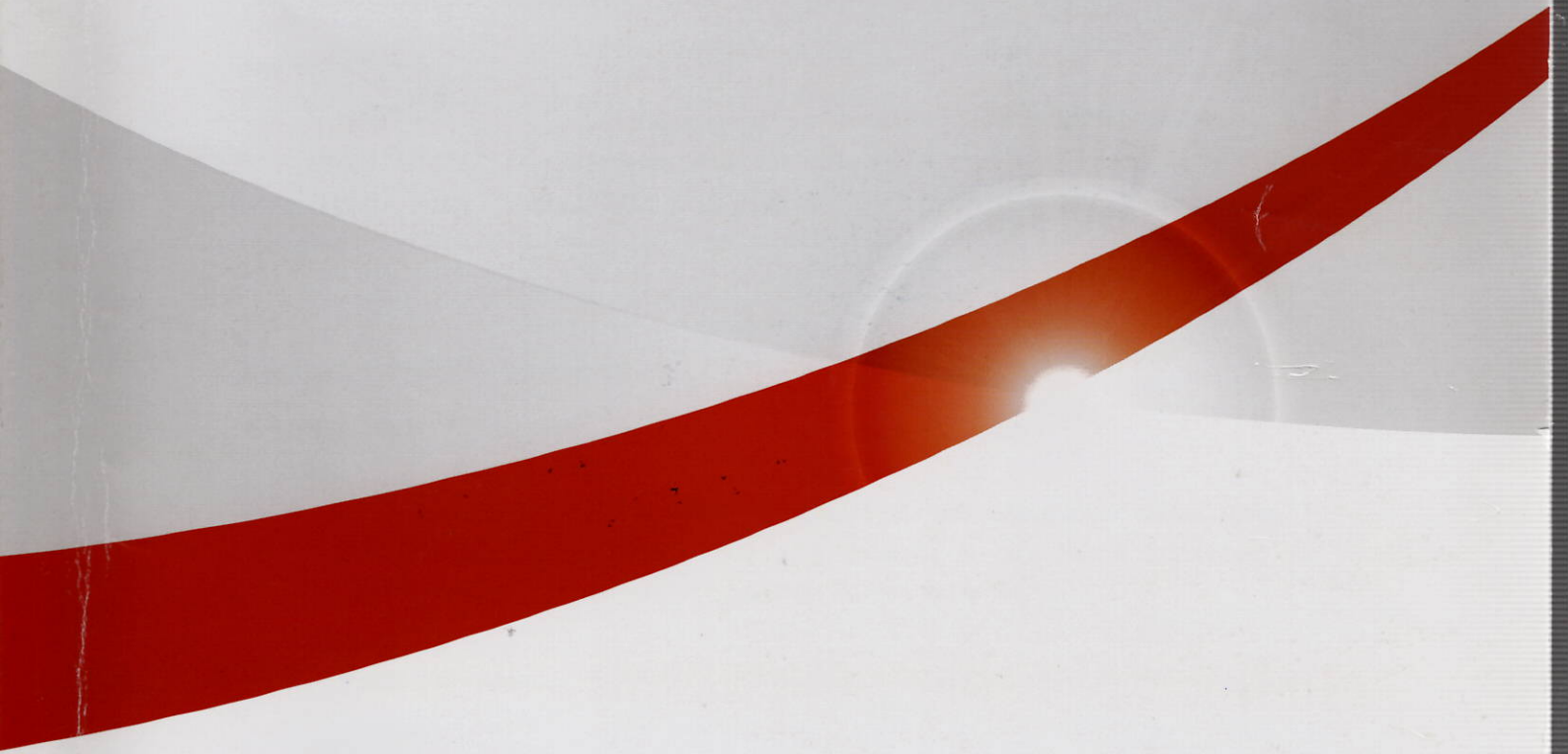

mindray

8 Usar os Programas de CQ

8.1 Introdução

O Controle de Qualidade (CQ) é composto por estratégias e procedimentos que medem a precisão e a estabilidade do analisador. Os resultados implicam em confiabilidade dos resultados da amostra. O CQ envolve a medição de materiais com características estáveis conhecidas em intervalos frequentes.

A análise dos resultados com métodos estatísticos permite a inferência que os resultados da amostra são confiáveis. Mindray recomenda que você execute o programa de CQ diariamente com controles de nível baixo, normal e alto. Um novo lote de controles deve ser analisado em paralelo com o lote atual antes de seus prazos de validade. Isto pode ser realizado executando o novo lote de controles duas vezes ao dia por cinco dias usando um arquivo de CQ vazio. Os arquivos de CQ calculam a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação para cada parâmetro selecionado. As médias calculadas pelo instrumento dessas dez execuções devem estar dentro das faixas esperadas informadas pelo fabricante. O analisador fornece 4 programas de CQ: L-J CQ, X média CQ, X média R CQ e X-B CQ.

OBSERVAÇÃO

- **Você somente deve usar os reagentes e controles específicos da Mindray. Armazene e use os controles e os reagentes como indicado pelas instruções de uso dos controles e reagentes.**
-