

**Alterna®**



## Condições de armazenamento especial

Manter afastado da luz solar.


Armazenar o produto horizontalmente.

**pt** Bolsa para ostomia  
- 1 peça drenável


Cuidados com Estomia

## Como utilizar


### Preparação

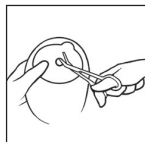

Recorte o adesivo para ajustá-lo ao tamanho e forma exata do estoma usando tesouras curvas e pequenas. Oriente-se pela marca de recorte sobre o adesivo. Você pode usar o guia de medição fornecido para medir o diâmetro e a forma do seu estoma. Um ajuste preciso entre a base adesiva e o estoma é importante para reduzir o risco de problemas de vazamento e de pele.

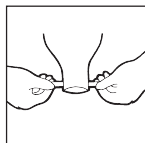


**Remova o clipe da folha e remova o papel protetor. Coloque o lado adesivo para baixo na abertura. Se o clipe não estiver colocado corretamente de início, remova-o e volte a colocá-lo. Dobre 4 a 5 vezes em direção à pele e, em seguida, dobre para trás as extremidades do clipe. Se tiver um grampo duro só é necessário dobrar a bolsa uma vez antes de fechar o grampo.**

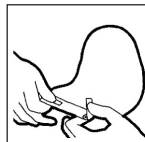

Limpe cuidadosamente o estoma e a área de pele ao seu redor. A pele deve estar totalmente seca antes de aplicar o adesivo.



### Aplicação

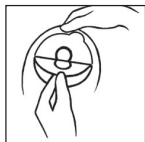

Retire a película de proteção do adesivo.



Dobre o adesivo para trás, alinhe o adesivo ao redor do estoma e pressione-o com firmeza na pele. O adesivo deve ficar bem ajustado ao redor do estoma. Para evitar vazamentos, é importante garantir uma vedação firme ao redor do estoma. Ao aplicar pressão na base adesiva/bolsa sobre o abdômen, comece na área ao redor do estoma e pressione o adesivo contra a pele. Passe o dedo ao redor do estoma para garantir a vedação do adesivo. Alise o adesivo para baixo, começando no estoma e indo em direção às bordas, para garantir que o adesivo esteja em contato total com a pele.



Aplique pressão sobre a bolsa para assegurar a aderência rápida e um ajuste perfeito entre o adesivo e a pele ao redor do estoma.



### Instruções de utilização

Leia com atenção as instruções a seguir.

23327928 Version 1 O logotipo da Coloplast é uma marca registrada da Coloplast A/S. Todos os direitos reservados.© 2021-07-28

Coloplast do Brasil Ltda  
Rua Luis Correia de Melo, n° 92, Conj 141  
Vila Cruzeiro, São Paulo - SP, Brasil  
CEP 04.726-220  
CNPJ: 02.794.555/0003-40  
Resp. Tec: Daniel F. P da Silva  
CRF-SP: 99504  
Serviço de Apoio ao Cliente (SAC)  
Tel.: 0800 285 86 87  
Reg. ANVISA: 1043010022, 10430310099, 10430310100, 10430310101

### Finalidade prevista

A bolsa para ostomia é indicada para coletar passivamente efluentes de um estoma. A base adesiva é presa à bolsa para ostomia e deve aderir à pele intacta ao redor do estoma.

### Indicações

O dispositivo é indicado para pessoas com estoma.

### Alertas

A reutilização do produto de uso único não é recomendada, pois pode ocorrer contaminação cruzada, levando, possivelmente, a infecção local.

O reprocessamento, a lavagem, a desinfecção e/ou a nova esterilização podem comprometer as características do produto, o que poderá causar um risco adicional de danos físicos ou infecção ao usuário.

### Precauções

**Para uso apropriado, consulte um profissional de saúde antes de começar a usar um produto de convexidade.**

**A bolsa de ostomia é rotulada como "Não segura para RM" pois seu clipe de fechamento contém metal. A bolsa, ou o clipe metálico, deve ser removida antes do exame de RM.**

**Este produto não é estéril e deve ser usado com precaução em bebês prematuros ou bebês que estejam em incubadoras, pois ele pode aumentar o risco de infecção.**

### Informação

Bolsa para ostomia de uso único.

Os produtos devem ser armazenados na caixa até serem removidos para uso, pois a caixa protege o produto, e a etiqueta na caixa contém informações importantes como número do lote, data de validade e código de barras exclusivo.

A Coloplast não aceita responsabilidade por qualquer lesão ou perda que possam surgir se estes produto for utilizado de forma contrária às atuais recomendações da Coloplast.