



DESCARBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 11.671.812/0001-85
AF nº 8.09.376-3

Rod. PR 317, 8.407 – Pq. Industrial
Maringá – PR 44 3123-8700
comercial@descarbox.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO

COLETOR DE MATERIAIS INFECTANTES, PERFURANTES E CORTANTES DESCARBOX ECOLOGIC

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA

Responsabilidade Técnica:

Flávia Dalla Pria

CRQ / Pr – nº 9201624



DESCARBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 11.671.812/0001-85
AF nº 8.09.376-3

Rod. PR 317, 8.407 – Pq. Industrial
Maringá – PR 44 3123-8700
comercial@descarbox.com.br

1. Modelo Comercial e Imagem do produto:

- Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Ecologic - 03 L
- Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Ecologic - 07 L
- Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Ecologic - 13 L
- Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Ecologic - 20 L



2. Nome Técnico:

- Recipiente para Perfurocortantes/Infectante;

3. Formas de Apresentação Comercial do Produto:

- Embalagem primária: 10 unidades do produto, embalados fita de arquear;
- Embalagem secundária: 20 unidades do produto, embalados em caixas de papelão.

4. Descrição do Produto, Especificações e Características Técnicas do Produto:

Os coletores sevem para descarte de materiais infectantes, quando na cor amarela, e é permitir o descarte adequado de: Seringas descartáveis/agulhas hipodérmicas, agulhas de sutura, escalpes, lâminas de bisturi, estiletes de cateteres intravenosos (IV), agulhas



DESCARBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 11.671.812/0001-85
AF nº 8.09.376-3

Rod. PR 317, 8.407 – Pq. Industrial
Maringá – PR 44 3123-8700
comercial@descarbox.com.br

para coleta de sangue espinhal ou epidural, agulha de medula óssea, para biopsia, tipo Huber ou outro tipo de agulha com lúmen. Vidros, como tubo capilar ou pipeta. Frasco de amostra, tubos de ensaio/vácuo. Descarte de fragmento ósseo/lasca de dente, osteotomos, serras, cisalhas, dispositivos de eletro cauterização Bovie, Lima, Sonda exploradora, Fórceps de extração, descolador, Lâmina para corte histológico.

5. Composição:

- Recipiente para descarte de perfurocortantes/infectantes na cor amarelo dourado
- Coletor de papelão ondulado [onda B] na cor pardo;
- Sacola de revestimento de polietileno [PEBD];
- Fundo e Cinta interna de papel rígido (reciclado de materiais, papéis e plásticos prensados);
- Bandeja interna de papelão ondulado [onda B];
- Acondicionado em embalagem primária caixa de papelão ondulado [onda B];

6. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO/ MECANISMO DE AÇÃO

- Dobrar 1ª aba, Dobrar 2ª e 3ª aba simultaneamente, e Dobrar 4ª aba até travar.
- Abra as abas superiores do coletor conforme a figura;
- Abra o saco plástico. Coloque o tabuleiro dentro do saco plástico. Introduza também a Cinta interna, posicionando-a em forma de triângulo sobre o tabuleiro
- Coloque o saco plástico já com o tabuleiro e a cinta dentro do coletor;
- Coloque as sobras do saco plástico para dentro do coletor;
- Introduza a bandeja impermeável dentro do saco plástico até o fundo;
- A seguir, faça a montagem das alças duplas dobrando-as para dentro;
- Posicione a orelha das alças para dentro, para apoio da tampa;
- Utilizar descartando os materiais até o limite de enchimento;



DESCARBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 11.671.812/0001-85
AF nº 8.09.376-3

Rod. PR 317, 8.407 – Pq. Industrial
Maringá – PR 44 3123-8700
comercial@descarbox.com.br

- Não manuseie, reencape ou entorte as agulhas usadas;
- Não desconecte a agulha da seringa; descarte o conjunto completo
- Travar o lacre para fechamento para descarte;
- Mantenha o coletor afastado do corpo;
- Fabricante não recomenda empilhamento do produto.

7. Cuidados e Precauções como Produto

- Fabricante recomenda uso único;
- Manusear afastado do corpo;
- Não exceder o limite determinado pela linha pontilhada;
- Destruir após o uso, conforme legislação ambiental vigente;
- Não estéril;
- Validade 5 (cinco) anos;
- Classe de risco I.
- Na falta de qualquer item do coletor não utiliza-lo.
- Não armazenar em local com umidade ou temperatura alta. Não deixar exposto ao sol por longo tempo.
- Manter longe de produtos químicos corrosivos. Manter em temperatura ambiente e livre de poeira.

8. Normas e RDC

NBR 13853-1/2018; NBR 7500/2018; NBR 5426/1985;
RDC 16/2013; RDC 222/2018
NCM 48.191.000