

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

DATA	DURAÇÃO	PROJETO/REVISÃO	LOCAL	SALA / ANDAR	TENSÃO DE REDE	RESPONSÁVEL
06 de Novembro de 2023	1:30 hs		Palmeiras de Goiás - GO	Térreo	Será confirmado	Rogério Gomes
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRAS DE GOIÁS		ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO:	Rua 2, QD. 07 – Setor Belo Horizonte – Palmeiras de Goiás - GO		
EQUIPAMENTO:	Somaton Go Now		PREVISÃO DE TÉRMINO DA OBRA:	Indefinido		
	RESPONSÁVEL TI	EMPRESA	CARGO	EMAIL	FONE	
N	NOME DO PARTICIPANTE	EMPRESA	CARGO	EMAIL	FONE	
1	Paulo Bisognini	Ibex Engenharia	Site Planner	paulo.bisognini@ibexengenharia.com	011 94067-1503	
2	Rogério Gomes	Hospital	Cordenador	departamentodeprocessosaude@gmail.com	064 99947-8565	
3	Rodrigo Lobo	Prefeitura	Eng. Civil	guiinlobo@hotmail.com	064 99648-6204	
4						
5						
6						
7						
8						

1. Itens e tópicos a serem providenciados para início da instalação física do equipamento:

LEGENDA: **S:** item disponível **N:** item não disponível **NA:** item não aplicável **PREV.:** previsão de término

1- ACESSO DO EQUIPAMENTO	S	N	NA	PREV.	OBSERVAÇÃO	RESPONSÁVEL
Vão de abertura para acesso do Equipamento	X				Equipamento armazenado no local.	
Rotas com dimensões mínimas	X					
Necessidade de içamento		X				
As Rotas de acesso, corredores suportam o peso do Equipamento.	X					
Dimensões do elevador			X			
Há rampas / Necessidade de escoramento para entrada do Equipamento		X				
2- REDE ELÉTRICA	S	N	NA	PREV.	OBSERVAÇÃO	RESPONSÁVEL
Quadro elétrico instalado (cliente)		X			Entregue com o equipamento.	
Estabilizador instalado / Trafo Elevador (cliente)		X				
Cabos elétricos do QDF ao Equipamento / LCB / Armário disponíveis		X				
Sistema terra com 2 ohms de impedância, conforme Norma 5410		X			Solicitado laudo de aterramento.	
Tomadas e iluminação nas salas	X				Tomadas básicas (Executaram sem projeto)	
Potencia requerida disponível		X			Informado ao Eng. Rodrigo a necessidade de 50 KVA's	

SIEMENS

Healthcare

Avenida Mutinga, 3800 – 5º Andar – CEP. 05110-902 – São Paulo – SP

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

3- OBRA CIVIL	S	N	NA	PREV.	OBSERVAÇÃO	RESPONSÁVEL
S A L A D E E X A M E S						
Pé direito até a laje / viga	X				PD = 2,80 até forro de gesso.	
Haverá andar superior / pé direito			X			
Haverá andar inferior / pé direito			X			
Reforço do piso realizado área do Equipamento e mesa de exames		X			Eng. Rogério irá confirmar se haverá necessidade de reforço.	
Piso colocado e nivelado / Tolerância 2 mm / m	X				Piso de cerâmica instalado.	
Paredes e aberturas prontas	X					
Sala de exames com as dimensões conforme projeto	X				Projeto executado conforme dimensões existentes.	
Porta de acesso com largura de 1,20 mts instalada	X					
Visor Plumbífero instalado a 90 / 135 cm do piso		X				
Gases Médicos instalado em local definido pelo cliente		X				
Botão soco de Emergência instalado a 1,80 mts		X				
Paredes Baritadas / Laminadas com Chumbo conforme Norma RDC 50		X			Eng. Rodrigo irá confirmar se a parede foi baritaada.	
Portas de acesso laminadas com chumbo conforme Norma RDC 50		X			Eng. Rodrigo irá confirmar se a porta é plumbífera.	
Sala está limpa sem restos de obra e com acesso desobstruído	X				Necessário adequação indicada em projeto.	
S A L A T É C N I C A						
Paredes, teto e piso acabados e colocados.			X			
Dutos ou canaletas providenciados conforme projeto elétrico			X			
Abertura de porta mínima 0,90 X 2,10 mto			X			
Iluminação e tomadas providenciadas			X			
Ralo seco ou sifonado providenciado			X			
S A L A D E C O M A N D O						
Paredes, teto e piso acabados e colocados.	X					
Dutos ou canaletas providenciados conforme projeto elétrico		X				
Ponto de rede ADSL disponível com conector RJ45 disponível		X				
Linha de telefone ou ramal disponível		X				
Botão Liga Desliga instalado a 1,80 mts		X				
4- AR CONDICIONADO	S	N	NA	PREV.	OBSERVAÇÃO	RESPONSÁVEL
Dutos de insuflamento/exaustão instalados		X			AC será do tipo Split.	
Equipamentos posicionados e instalados	X					
Medidor de Temperatura e Umidade Instalados (MI)		X			Solicitado instalação do termo higrômetro e desumidificador.	
Sistema de climatização testado e em funcionamento		X			Deverá estar operante e testado para início da instalação	
5- CHILLER	S	N	NA	PREV	OBSERVAÇÃO	RESPONSÁVEL
Definido local para instalação			X			
Tubulação para o Chiller instalada			X			
Quadro remoto na sala técnica instalado.			X			
Disponibilizado 80 litros de água destilada			X			

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

TEMAS COM DESCRIÇÃO DETALHADA	
1 – Informado demanda do equipamento de 50 KVA's em 380 V.	
2 – Informado peso do equipamento (Gantry) de 1140 Kg.	
3 – Informado sobre o ponto do roteador a 2,20 mts e botoeiras a 1,80 mts do piso conforme projeto.	
4 – Informado sobre a luz indicadora de radiação e door switch interligada ao QDE conforme projeto.	
5 – Equipamwnto aarmazenado no corredor próximo a sala de exames.	
6 – Informado sobre ponto de SRS (Monitoramento Remoto).	
7 – . Solicitado que seja utilizado desumidificador dentro da sala de exames	
8 – Solicitado que seja disponibilizado termo-higrometro dentro da sala de exames.	
9 – Solicitado que seja disponibilizado tensão 380 V no QDE.	
10 – Infomado sobre a máxima reistencia de rede e terra (230 mΩ e 2,0 Ω respectivamente).	
11 – Informado que a alimentação elétrica com 5 vias de cabo (3F+N+T) entre QDE e gantry deverá ser fornecida pelo hospital, considerando uma folga de 2 mts em cada via.	
12 – Infraestrutura elétrica deverá atender as solicitações de projeto.	
13 – Informado os parametros de temperatura e umidade (22 +/- 2 e 50 +/- 10 respectivamente)	
14 – Infomado que caso haja necessidade de utilizar transformador, este deverá ser no mínimo 65 KVA's, não se limitando a este. O eng. eletricista deverá avaliar esta potência em função da impedância gerada.	
15 – Informado sobre o reforço de piso para atender aos esforços solicitates de peso do equipamento e tração dos paraboults de fixação.	

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

FOTOS DO LOCAL DA INSTALAÇÃO



Foto 1 – Vista geral da fachada e acesso do equipamento

Foto 2 – Vista da porta de acesso do equipamento.

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

FOTOS DO LOCAL DA INSTALAÇÃO



Foto 3 – Vista geral da recepção principal e acesso do equipamento.



Foto 4 – Vista corredor de acesso do equipamento.

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

FOTOS DO LOCAL DA INSTALAÇÃO



Foto 5 – Vista corredor de acesso a sala de exames.



Foto 6 – Vista geral da sala de exames.

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

FOTOS DO LOCAL DA INSTALAÇÃO



Foto 7 – Vista geral da sala de exames.



Foto 8 – Vista geral da sala de exames.

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

FOTOS DO LOCAL DA INSTALAÇÃO



Foto 9 – Vista geral da sala de comando.



Foto 10 – Vista geral da sala de comando.

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

FOTOS DO LOCAL DA INSTALAÇÃO



Foto 11 – Vista geral do equipamento armazenado.



Foto 12 – Vista geral do equipamento armazenado.