

FICHA TÉCNICA Polax®

Campo Operatório Não-Estéril Polax - CPR

Produto	Código	Shirink	Produto p/ Cx. Master	Medidas Caixa Master			Código de Barras DUN Cx. Master	Código de Barras EAN Produto	Classificação Fiscal
				Altura (cm)	Largura (cm)	Comp. (cm)			
C.O. Light C/RX	CPR	16x50 un.	16 pacotes	40	45	56	7898522424939	7898522425028	3005.90.90



Nome Comercial: Compressa Cirúrgica Light

Código de Faturamento: CPL e CPR

Modo de Uso

- É indicada para uso hospitalar em cirurgias em geral, para absorver sangue, líquidos e outras secreções. Também é utilizada em cirurgias cavitárias como anteparo atraumático para tecidos e órgãos.
- A alça do campo operatório deve ser mantida do lado externo da cavidade cirúrgica, envolvendo o pulso do cirurgião ou não, como forma de precaução, facilitando, assim, seu manuseio e oferecendo melhores condições de visibilidade no local da cirurgia.

Precauções, Restrições e Advertências

- Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.
- Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Conservar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.
- Produto de uso único. Proibido reutilizar. Destruir após o uso.
- Antes do uso, recomenda-se sua esterilização em autoclave a vapor, óxido de etileno (ETO) ou raio ionizante (radioesterilização).

Especificações do Produto

- Produto não esterilizado
- Dimensão: 40 cm x 45 cm
- Massa mínima por unidade: 16 gramas
- Pode possuir ou não elemento radiopaco (C/RX e S/RX)
- Registro da Anvisa: 10341660005
- Classificação de Risco: I - Baixo Risco
- Embalagem Interna: acondicionado em saco plástico leitoso contendo 50 unidades.
- Embalagem Externa: acondicionado em caixa de papelão com 16 pacotes, totalizando 800 campos.

Descrições do Produto

- Fabricado com tecido 100% algodão
- Possui camadas de gaze sobrepostas fixadas entre si, o que evita o deslizamento entre elas.
- É alvejada, isenta de amido, alvejantes ópticos, corantes corretivos e quaisquer outros que possam agredir a pele.
- Possui alça fabricada com cadarço duplo, firmemente unida ao seu corpo.
- As bordas possuem bainhas tipo "overlock" para evitar o desfiação.
- Possui excelente capacidade de absorção e retenção de líquidos e secreções.

Condições de Armazenamento

- Para manutenção da integridade das embalagens, deve-se manter a embalagem intacta e evitar manuseios desnecessários.
- O armazenamento deve ser feito em local apropriado, em cima de estrados ou pallets, evitando contato direto com o piso.
- Empilhamento máximo: 4 caixas.

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Patricia Ramos Gomes | CRQ 02103006