

	FORMULÁRIO	F-PGQ-058-A
	FICHA TÉCNICA	Versão: 03 Data de Emissão: 21/02/24 Pág: 1 de 2

COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL COM ELEMENTO RADIOPACO DIONE

Nome Técnico: Compressas

Nome Comercial: Compressa Cirúrgica Campo Operatório Estéril com Elemento Radiopaco Dione

Cadastro na ANVISA: 81481900003



1- Descrição do Produto

- Tecido 100% algodão, de ligamento tela (tafetá), com camadas de gaze fixadas entre si de forma a evitar deslizamento das camadas, alvejado (isentos de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido), com dispositivo para fixação, na forma de alça livre, e acabamento em overlock. Apresenta-se estéril e com elemento radiopaco que é um material inócuo, impregnado com no mínimo de 55% de sulfato de bário, firmemente fixado ao seu corpo.
- Confeccionados em tecido macio e neutro;
- Altamente absorventes;
- Esterilizado por óxido de etileno;
- Embalados em envelopes de filme e PGC (papel grau cirúrgico);
- Abertura asséptica;
- Produto fabricado no Brasil, com matéria-prima 100% brasileira.

2- Apresentação do Produto

- Envelopes com 5 unidades.
- Dimensões: 25 cm x 28 cm, pré-levada;
- Peso: 15g;
- Com embalagem simples.

3- Indicação de Uso/Finalidade

A Compressa Cirúrgica Campo Operatório Estéril com Elemento Radiopaco Dione é indicada para cirurgias na absorção de sangue e secreções, barreira (hemostática) antiaderente na contenção de hemorragias e ainda como anteparo traumático de vísceras e tecidos.

	FORMULÁRIO	F-PGQ-058-A Versão: 03
	FICHA TÉCNICA	Data de Emissão: 21/02/24 Pág: 2 de 2

4- Instrução de Uso

Abrir a embalagem através da técnica asséptica, para diminuir o risco de contaminação.

Retirar as compressas de campo operatório da sua embalagem e aplicar sobre a área lesionada que necessite que o sangue e/ou as secreções sejam absorvidos ou sobre a área da ferida aberta.

5- Armazenamento e Transporte

Armazenar e transportar em local limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e luz solar. Não há faixas de temperatura e umidade determinadas para o armazenamento e transporte do produto. Sendo assim, o produto pode ser armazenado e transportado sem a necessidade de controle de temperatura e umidade, seguindo as recomendações citadas.

6- Precauções, Restrições e Advertências

- Validade: 5 anos a partir da data de fabricação, enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada.
- Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada.
- Produto de uso único. Proibido reprocessar. Destruir após o uso.
- Conservar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.
- Após o uso descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

Data da Aprovação: 21/02/2024

BARBARA PEREIRA
MENDES:0894604
0661

Assinado de forma digital por
BARBARA PEREIRA
MENDES:08946040661
Dados: 2024.02.21 09:59:17
-03'00'

Garantia da Qualidade