



Algi-gel Alginato para impressão

Algi-gel é um alginato para impressão tipo II (presa normal).

Indicação:

- É indicado para moldagens totais ou parciais de bocas dentadas e desdentadas, em trabalhos de próteses totais ou parciais removíveis, na confecção de modelos de estudos para trabalhos de ortodontia. Também é útil em moldagens para a confecção de restaurações unitárias e múltiplas, coroas e pontes fixas.

Passo a passo:



Passo 01
Material para impressão



Passo 02
Medida em pó (10 g) e em seguida adicionar a água (19 mL)



Passo 03
Espalhar por 1 min, para que a mistura fique homogênea e cremosa



Passo 04
Selecionar a moldura desejada e acomodar o produto



Passo 05
Assentar a moldura local desejada e copiar todos os detalhes



Passo 06
Resultado final da impressão



Excelente reprodução dos detalhes da cavidade bucal



Agradável sabor de Tutti-Frutti



Dustless, produto livre de poeira



Alto poder de resistência à compressão

Apresentações:

- Embalagem com 410 g ou 454 g



Flex-sil Silicone de condensação

Flex-sil é um sistema de impressão à base de polisiloxano, elastômero de silicone do tipo condensação.

Indicação:

- Indicado para a realização de impressões das arcadas dentárias tanto pela técnica da dupla moldagem, quanto pela técnica da moldagem simultânea, para moldagens para próteses fixas e removíveis, ortodontia e modelos de estudo.



Excelente compatibilidade com gesso



Alta capacidade de reprodução de detalhes



Tempo de presa favorável para sua manipulação

Apresentações:



1 Flex-sil Fluido com 120 g



1 Flex-sil Catalisador com 50 g



1 Flex-sil Denso com 500 g



1 Flex-sil Denso com 1 kg



1 Flex-sil Catalisador com 50 g

1 Flex-sil Fluido com 120 g

1 Colher medidora