

Avagel

Materia de moldagem



SAIBA MAIS



Mensagem Chave: O Alginato bicromático e tipo II da Dentsply Sirona para o seu dia a dia. O Avagel possui baixa sinérese e contém Clorexidina em sua formulação se tornando antimicrobiano. Possui sabor tutti-frutti e muda de cor duas vezes para facilitação na manipulação e identificação da presa total.

O que é preciso saber sobre o Avagel:

- Alginato bicromático: Adquire a coloração rósea durante a espatulação, retornando a cor branca após total gaseificação, o que indica o momento adequado para remoção da moldeira da boca. Após o tempo necessário para desinfecção o molde retorna para coloração rósea, indicando o melhor momento para vazar o gesso.
- Sabor tutti-frutti e altamente elástico
- Recomenda-se manipular com máscara de proteção facial.
- Estabilidade imediata e presa regular;
- Recomenda-se que durante todos os procedimentos clínicos profissional, auxiliares assim como pacientes utilizem óculos de proteção.
- Para uma moldagem de uma hemiarcada, utilizar uma medida de pó de 8,5g para uma medida de água de 18mL.
- Inserir a moldeira com Avagel em sua devida posição na boca, comprimindo-a ligeiramente
- Para se obterem melhores resultados, recomenda-se verter o gesso imediatamente após a moldagem

Apresentação comercial:

- AVAGEL 410g

SKU	DESCRIÇÃO
55-05730060000	AVA GEL REFILL 410 GR

