

LOTE 04: FICHA TÉCNICA



EQUIPO DE INFUSÃO GRAVITACIONAL ESTÉRIL DE USO ÚNICO

FABRICADO POR:

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

Av. Comendador José Zillo nº 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

Indústria Brasileira - CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscriç. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: www.injex.com.br

Registro ANVISA nº: 10160610087

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto CREA-SP 5061280667

SAC: 0800-770 60 80

Instruções de Uso:

- Escolher o melhor modelo de equipo para realização do procedimento e verificar a data de validade.
- Abrir a embalagem de forma asséptica e retirar o produto;
- Fechar a pinça rolete completamente e certificar que a tampa protetora do filtro de ar da câmara de gotejamento esteja fechada;
- Retirar a tampa protetora do bico perfurador do equipo e encaixar no frasco com a solução;
- Deixar passar a própria solução através do equipo promovendo uma rinsagem. Para isso, coloque o conjunto frasco mais equipo em posição vertical, abrindo a pinça rolete e a tampa protetora do filtro de ar da câmara de gotejamento;
- Instalar a infusão no paciente retirando o protetor plástico da conexão distal do circuito e conectando o mesmo ao acesso venoso conforme técnica;
- Regular o gotejamento na câmara com o regulador de fluxo, segundo prescrição médica;
- Verificar se a infusão está adequada.
- Quando necessário a infusão de outra droga no mesmo acesso venoso, utilizar o injetor lateral do equipo, fechando a pinça rolete durante esse procedimento. Após o término, reabrir e regular a pinça conforme prescrição médica.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/07/2024 15:49:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELZIANA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS (AGENTE DE CONTRATAÇÃO - UT-FINSUPRI-HMSA - SESA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-QX1FCR>