

MERCUR	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO		FTP: BC1541	Revisão: 002	
Produto: ANDADOR TRIANGULAR DE ALUMÍNIO INFANTIL COM 2 RODAS					
IDENTIFICAÇÃO			FISCAL		
Tamanho	Referência	Código Interno	Classificação Fiscal	IPI	ICMS
PP	BC1542-AA	B061542-AA	9021.10.10	0,0%	Isento
Composição		Corpo: alumínio Rodas: Pneu: policloreto de vinila Aro: polipropileno Ponteiras: borracha Apoio de mão: policloreto de vinila	 		
Prazo de validade		5 anos			
INFORMAÇÕES DO PRODUTO E EMBALAGEM					
	Peça		Embalagem Inner		Embalagem Máster
Dimensões		43cm x 60cm	70cm x 75cm		51cm x 22,5cm x 66cm
Peso		2,80Kg	3,15Kg		6,30Kg
Quantidade na Embalagem			1 peça		caixa com 2 peças
Código de Barras			7896342911509		17896342911506
Empilhamento Máximo da Caixa Máster		5			
Empilhamento Máximo do Pallet		1 caixas máster no lastro / 8 caixas másters de altura / total de 8 caixas máster no pallet			
CARACTERÍSTICAS GERAIS					
ANVISA		81284250006			
Introdução		O Andador Triangular de Alumínio Infantil com 2 Rodas Mercur auxilia na locomoção de crianças com dificuldade de mobilidade. Desenvolvido em alumínio, para maior leveza e resistência, proporciona apoio seguro e adequado para caminhar e realizar atividades diárias com maior independência. Os apoios de mão são macios, trazendo conforto ao usuário. Para maior praticidade, o Andador pode ser dobrado, facilitando o transporte e armazenamento.			
Precauções		Ler todas as informações desta embalagem ajuda no uso correto do Andador, pois foram elaboradas pensando nos benefícios que este produto oferece quando utilizado de forma segura e adequada. O uso do Andador, incluindo o ajuste de altura do mesmo, deve ser sempre orientado por um profissional da saúde. Andadores com rodas podem ser instáveis e requerem atenção especial no uso. Antes da criança utilizar o Andador, é importante que um adulto certifique-se de que o produto está totalmente aberto, todas as partes estão firmemente fixadas, nenhum parafuso precisa ser ajustado e os pinos de ajuste de altura estão bem encaixados. A Criança precisa ser orientada a não mudar os ajustes de altura do produto. é preciso ter cuidados com pisos molhados, desnivelados ou com buracos. Andadores não podem ser usados em escadas. Substitua as rodas e ponteiras quando apresentarem sinais de desgaste. Quando não estiver em uso, conserve ao abrigo do calor, da luz e da umidade. Lembre-se: A orientação de um profissional da saúde é indispensável para o uso do Andador, pois é necessário avaliar o desenvolvimento motor da criança, que para utilizá-lo necessita ter um bom controle de tronco, movimentar as duas pernas, braços e mãos (mesmo que com certa dificuldade e conseguir manter-se em ortostase (posição em pé) com auxílio.			
Indicações		Auxílio em alterações do equilíbrio e de locomoção em casos de: Redução da força e resistência muscular de membros inferiores ou generalizada. Alterações do tônus muscular (hipertonia/hipotonia). Redução da amplitude de movimento dos membros inferiores. Alterações da coordenação motora. Capacidade limitada, seja temporária ou permanente, para suportar o peso sobre os membros inferiores. Auxílio para reeducação da marcha / treino de marcha. Treino de equilíbrio e de habilidades funcionais.			

Modo de usar	Antes de começar a andar com o apoio do Andador, recomendamos que um profissional da saúde faça os ajustes na altura do produto, bem como oriente e treine a criança quanto ao deslocamento com segurança. Certifique-se de que o Andador está totalmente aberto e verifique atentamente se todos os tubos estão ajustados na mesma altura, com as rodas e ponteiros bem apoiadas no solo. Com o corpo alinhado entre as laterais do Andador, oriente a criança a desloca-se vagarosamente, buscando sentir a estabilidade do mesmo. Como abrir e dobrar o Andador? Para abrir o Andador A, puxe os tubo traseiros com as ponteiros 1, separando-as dos tubos dianteiros com as rodas 2, até que as dobradiças laterais estejam bem abertas. Para verificar se estão travadas, pressione as ,essas para baixo B. Para fechar o Andador C, fique de frente para a abertura do mesmo, puxe as dobradiças laterais para cima 3 e empurre os tubos traseiros com as ponteiros 4 em direção aos tubos dianteiros com as rodas 5. Como fazer o ajuste da altura do Andador? Com a criança em pé, ajuste a altura do Andador de forma que o apoio de mão fique posicionado paralelo ao seu quadril (proeminência óssea lateral ao quadril) e, sempre que possível, proporcione uma flexão dos cotovelos entre 20 e 30 graus. Adapte a altura do Andador através do pino-mola de ajuste existente em cada tubo inferior, verificando a posição através do indicador de posição do pino (ranhuras do tubo inferior, ao redor da área do pino). Verifique atentamente se todos os tubos estão ajustados na mesma altura.
Atributos	5 Ajustes de altura Dobrável (fácil transporte e armazenamento). Leve e resistente. Apoios de mão em material macio.
Modo de limpar	O Andador pode ser higienizado com álcool ou sabão neutro, com auxílio de um pano macio. Não use produtos abrasivos. Após limpo, deve ser mantido seco.
Descarte da embalagem	Esse produto tem como embalagem um saco plástico. Orientamos o descarte no lixo plástico ou lixo seco. Esse produto contém papelão como embalagem. Orientamos o descarte no lixo de papel ou lixo seco.
Descarte do produto	Esse produto é composto pelas seguintes partes recicláveis: - Apoio de mão e rodas: policloreto de vinila (PVC). Orientamos o descarte das partes plásticas no lixo plástico ou lixo seco. - Tubos metálicos: alumínio. Orientamos o descarte das partes metálicas no lixo de metal ou lixo seco. - Ponteira: borracha. Orientamos o descarte das partes de borracha no lixo seco.