

ADVERTÊNCIAS

- ⚠️ A manutenção do Equipamento deve ser realizada exclusivamente pelo Fabricante ou Assistência Técnica autorizada, caso contrário perderá garantia.
- ⚠️ Mantenha o equipamento acondicionado em sua bolsa de transporte ou na Cabina de Emergência (caso possua), para evitar danos.
- ⚠️ Previnha as pás de choque adesivas de encostarem entre si, em eletrodos de ECG, curativos ou quaisquer outros objetos metálicos, devido ao risco de o paciente sofrer queimaduras na pele durante a desfibrilação e a corrente ser desviada do coração.
- ⚠️ Não encoste na superfície de contato das pás adesivas, no paciente ou em qualquer material condutivo que esteja em contato com o paciente durante a análise do ECG ou desfibrilação, pois os resultados podem ser afetados e a segurança reduzida.
- ⚠️ Os eletrodos poderão ser deixados no paciente durante 6 (seis) horas, para condições ideais de pele (íntegra, sem ferimentos, irritações, dentre outros).
- ⚠️ Este equipamento dispara choque elétrico (quando indicado) para tratamento de arritmias. Caso existam outros equipamentos conectados ao paciente, no momento do choque, os mesmos podem ser danificados com a descarga elétrica. Ao utilizar este equipamento desconecte outros dispositivos.
- ⚠️ Jamais use baterias e carregadores não fornecidos pelo Fabricante e/ou baterias não seridas. A Cmos Drake não se responsabiliza por danos causados mediante uso de baterias de terceiros não autorizados, visto que podem acarretar em perda de performance e risco de explosão.
- ⚠️ O equipamento só funciona com alimentação de bateria interna. O carregador de bateria não pode estar conectado. O equipamento não inicializa com o carregador conectado.
- ⚠️ Jamais desmonte, perfure, amasse ou abra a bateria. Respeite o circuito de segurança.
- ⚠️ Evite usar telefone celular ou quaisquer dispositivos que captem frequência de rádio próximo ao equipamento. O alto nível de radiação eletromagnética emitida por estes aparelhos pode resultar em interferência, prejudicando o funcionamento normal do desfibrilador, colocando em risco a segurança do paciente.
- ⚠️ Nenhuma modificação neste equipamento e em suas partes são permitidas.
- ⚠️ Este equipamento não foi projetado para funcionar em ambientes com substituintes de agentes anestésicos e de limpeza inflamáveis. Não o operar na presença de gases inflamáveis.
- ⚠️ Para prevenir contra risco de fogo ou choque indevido, evite operar o acomodar o equipamento perto de fonte de água ou produtos inflamáveis, não deixe produtos líquidos sobre o gabinete e/ou carregador de bateria.
- ⚠️ Não utilize o Desfibrilador Lite 400 Futura em áreas onde haja o risco de explosão.

CUIDADOS COM BATERIAS

O DEA Lite 400 Futura funciona exclusivamente com bateria internas. Utilize apenas baterias especificadas pelo fabricante. Verifique regularmente o nível restante de bateria. Caso o equipamento indique bateria baixa, recarregue ou substitua a bateria.

Para baterias recarregáveis:

- ➊ Conecte o carregador de bateria no painel traseiro do equipamento.
 - ➋ Mantenha a parte traseira do equipamento a uma distância mínima de 20 cm de qualquer outro dispositivo ou da parede.
 - ➌ O tempo de carga para uma bateria totalmente esgotada é de 4 horas.
 - ➍ A luz verde no carregador indica fim da recarga.
- Para baterias descartáveis:
- ➎ Posicione o equipamento com a sua parte inferior para cima.
 - ➏ Empurre a trava na posição indicada no pack de bateria.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Deve-se efetuar a limpeza do equipamento e de seus acessórios não descartáveis a cada utilização ou ao constatar sujeira visível. Caso não tenha sido utilizado, recomenda-se que a limpeza seja realizada trimestralmente.

- ➐ Desligue o equipamento da rede elétrica.
- ➑ Desconecte os acessórios.
- ➒ Prepare um tecido levemente umedecido em água e sabão líquido neutro e um tecido umedecido com álcool etílico 70%.
- ➓ Limpe o gabinete do equipamento e carregador usando o tecido com água e sabão.
- ➔ Desinfete o gabinete do equipamento e carregador usando o tecido com álcool.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | AÇÃO RECOMENDADA |
|--|---|
| O equipamento não liga | Mantenha o botão de ligar/desliga pressionado por no mínimo, 3 segundos. Verifique conexão e nível de carga da bateria. Se o equipamento não ligar, entre em contato com a assistência técnica. |
| O equipamento emite um "beep" | Indica que a bateria está fraca e deve ser recarregada ou substituída. Caso a bateria tenha sido carregada recentemente e pouco usada, entre em contato com a assistência técnica. |
| O equipamento liga, mas fica repetindo a mensagem: "Coloque os Eletrodos no tórax do Paciente" | Verifique se a conexão dos eletrodos com o equipamento está correta. Verifique se a adesão dos eletrodos ao paciente está adequada. Realize a tricotomia no paciente. Substitua os eletrodos. Se persistir, entre em contato com a assistência técnica. |

GUIA RÁPIDO

DESFIBRILADOR
EXTERNO
AUTOMÁTICO
DEA
Lite400 FUTURA



Serviços Técnicos



CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA;

AV. REGENT, 600
B. ALPHAVILLE, LAGOA DOS INGLESES
NOVA LIMA – MG – CEP: 34.018-000
TELEFONE: +55 31 3547-3969

CMOS
DRAKE



MAN00003_02

www.cmosdrake.com.br

O EQUIPAMENTO



- 1 Conector das pás de choque
- 2 Display gráfico
- 3 Indicador de bateria fraca
- 4 Botão de tratamento
- 5 Alça para transporte
- 6 Botão de liga/desliga

INDICAÇÃO DE USO


- O DEA Life 400 Futura deve ser utilizado por público Suporte Básico de Vida e por médicos e socorristas capacitados para Suporte Básico e/ou Avançado de Vida.
- O DEA Life 400 Futura deve ser utilizado em pacientes inconscientes, sem respiração espontânea e sem pulso palpável.
- Para pacientes com idade inferior a 8 anos ou com peso inferior a 25 Kg é necessário utilizar as pás de choque descartáveis infantis.
- Caso não seja possível posicionar as duas pás no tórax do paciente com um espaçamento maior ou igual a 4 cm, deve-se posicionar uma pá no peito e a outra nas costas.

LIGANDO O EQUIPAMENTO

- Desconecte o carregador da bateria.
- Pressione o botão liga/desliga durante 3 segundos.
- Aguarde exibição da tela "Cmos Drake" e, em seguida, o comando de voz e texto "Pronto para uso".

OPERANDO O EQUIPAMENTO

- O equipamento deve permanecer a uma distância mínima de 20 cm do operador e do paciente.
- Inicialize o equipamento.
- Encaixe os eletrodos no equipamento após comandos de voz e texto "Encaixe o conector dos eletrodos no equipamento".
- Fixe os eletrodos no paciente, conforme abaixo, após comandos de voz e texto "Coloque os eletrodos no tórax do paciente".

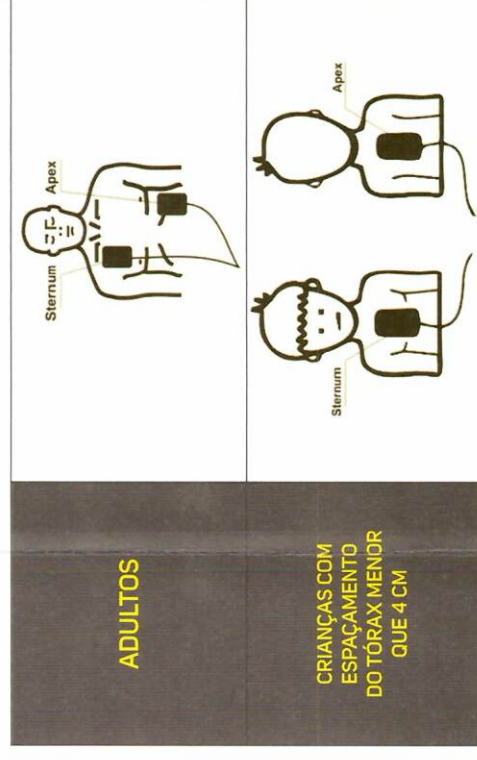

- Afaste-se do paciente após comandos de voz e texto "Afaste-se do paciente" ou "Mantenha-se afastado".
- Aguarde a análise do sinal de ECG após comandos de voz e texto "Analisando".
- Aguarde comando de voz e texto "Tratamento indicado" ou "Tratamento não indicado".
- Quando o tratamento for indicado, pressione o botão de tratamento após comandos de voz e texto "Pressione o botão de tratamento".
- Realize a RCP no paciente após comandos de voz e texto "Realize a RCP por 2 minutos".

DESLIGANDO O EQUIPAMENTO

- Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos até tela apagar.
- Desconecte o conector dos eletrodos adesivos do equipamento.
- Desconecte os acessórios do paciente (caso tenha sido utilizado).
- Efetue a limpeza do DEA e seus acessórios não descartáveis.
- Reconecte o carregador de bateria ao equipamento e mantenha-o sempre com a bateria cheia.
- Encamine os eletrodos adesivos usados para descarte.
- Conecte novos eletrodos adesivos ao equipamento para agilizar o próximo atendimento.