



Estetoscópio Duplo Inox Black Edition ES1507 BIC

Referência: 2003499 Marca: [BIC](#)

Vendido e entregue por:

[Medical Estetoscópios](#)

R\$ 259,90

Em até 5x R\$ 51,98 sem juros

[Ver formas de pagamento](#)

Detalhes do produto

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Consulte o prazo e entrega

undefined

CONSULTAR

[Não sei meu CEP](#)

Compartilhe:

Descrição do Produto

Especificações Técnicas

Avaliações

Perguntas e respostas

Estetoscópio Duplo Inox Black Edition ES1507 BIC

O Esteto
o seu aus
frequênc
utilizado
precisão
emitidos

[Controle sua privacidade](#)

[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-out](#)

[Customizar](#)

Rejeitar

Aceitar

nobre aço inox de alta durabilidade, pensando nos mínimos detalhes,
ar sons cardíacos, corporais e pulmonares, com sons de alta e baixa
es, que são: fechado com membrana de plástico rígido (diafragma),
distinção e aberto (sino) que é utilizado para localizar com maior
fragma a ser utilizado, é necessário girar o auscultador a 180°, os sons
agma com a região de interesse.

O Estetoscópio Duplo Adulto e Pediátrico ES1507 é indicado para:

- Tubo de PVC;
- Câmara de som;
- Tubo transmissor.

Características e Benefícios do Produto:

- REF.: ES1507;
- Cor: Black Edition;
- Linha: Eternity;
- Tubo em "Y" de PVC;
- Mola em aço cromado;
- Modelo: Duplo Adulto e Pediátrico;
- Par de olivas em PVC e/ou silicone;
- Ângulo em metal cromado e/ou com tratamento;
- Para verificação de sinais vitais, aferição de pressão e triagem;
- Auscultador com anel isolante para evitar sensação de frio ao paciente.

Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação.

Como utilizar o Estetoscópio Duplo Adulto e Pediátrico?

Passo 1 • Encaixar o fone biauricular nos ouvidos de maneira a isolar todos os sons externos;

Passo 2 • Toque algumas vezes, levemente, a membrana para saber se as olivas estão posicionadas corretamente nos ouvidos, e qual diafragma está na posição de uso, isso produzirá um ruído;

Passo 3 • Encostar o diafragma na área a ser analisada;

Passo 4 • Para trocar o diafragma a ser utilizado (lado cardíaco ou pulmonar), segure o auscultador e gire-o em 180° (graus).

Como realizar a higienização do Estetoscópio BIC?

O Estetoscópio Bic foi projetado para oferecer conforto ao paciente e uma excelente ausculta ao profissional por longos anos. Com a correta e rotineira higienização, é possível assegurar um bom funcionamento e o prolongamento da vida útil do estetoscópio, também mantendo a bela aparência do equipamento.

- Mantenha longe do calor extremo, frio, solventes e óleos;
- Olivas podem ser removidas dos tubos auriculares para uma limpeza completa;
- O estetoscópio deve ser limpo com uma solução de 70% de álcool isopropílico;
- Não meta o estetoscópio em água nem submeta-o a qualquer processo de esterilização;
- Diafragma e partes metálicas devem ser limpas com álcool ou água e sabão. Seque bem todas as partes antes de guardar.

[Controle sua privacidade](#)

[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-out](#)



Qualidade e variedade em equipamentos médicos!



0

[Departamentos](#)[Estetoscópio](#)[Aparelho de Pressão](#)[Equipamentos Médicos](#)[Curativos](#)[Fibra Bem-Estar](#)[Material de Consumo](#)[Odonto](#)[Vestuário](#) [FIBRA](#)

[Controle sua privacidade](#)

[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-out](#)



Qualidade e variedade em equipamentos médicos!



0

DepartamentosEstetoscópioAparelho de PressãoEquipamentos MédicosCurativosFibra Bem-EstarMaterial de ConsumoOdontoVestuário

Fi

[Controle sua privacidade](#)

[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-out](#)

Aqui na

essenciais durante toda jornada acadêmica e profissional da área da saúde,
essão, oftalmoscópios, otoscópios e muito mais.

Atendemos toda a linha médico-hospitalar, cirúrgica e home care.

Há mais de 10 anos priorizando a saúde.





Departamentos Estetoscópio Aparelho de Pressão Equipamentos Médicos Curativos Fibra Bem-Estar Material de Consumo Odonto Vestuário

Social

Trocas e devoluções

Profissões

Segunda à sexta das 8h às

Nossas marcas

Termos e condições

Fibra Bolsas

17h30

Venda na Fibra
Cirúrgica

Lojas Parceiras

Formas de pagamento

Selos de Segurança

© 2020 TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - CNPJ: 09.007.247/0001-04
R. Tupy, 1723 - Nova Brasília, Joinville - SC, 89214-505

[Controle sua privacidade](#)

[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-out](#)

